

EXTRA

SZÉPVILÁG

a széplpar szakmai szemmel

kozmetika

2008/4



IV. évfolyam 4. szám, ár: 650 Ft, 2.80 €

Alma Lasers Accent XL



Formálja újra egyéniségét!

Az In-Motion technika, és a 40,68 MHz-es hűtött rádiófrekvenciás kezelőfejek áttörést jelentenek az ügyfelek komfortérzete, a kezelés gyorsasága és hatékonysága terén. A kezelés során fokozatosan érjük el a célzott terápiás hőmérsékletet biztosítva a felsőbb bőrrétegek védelmét a sérülések és a fájdalom kockázatának minimalizálásával. Az egyszerűen cserélhető kezelőfejekkel különböző kezeléseket végezhet.

UniPoláris technológia: Az Unipoláris és az UniLarge RF kezelőfejek a szövetben 15 mm mélységig biztosítják az irányított hőtér fogat növelést, elérik a zsírszövetet és redukálják a narancsbőrt.
BiPoláris technológia: A Bipoláris RF kezelőfej a szövetet ránctalanítás, ráncsimítás, valamint bőrfeszítés céljából 4-6 mm mélységig melegíti.
Pixel technológia: Egypólusú rádiófrekvenciát alkalmaz. A Pixel RF kezelőfej segítségével célzottan kezelhető számos esztétikai probléma (heges akne, mély ráncok, stria, egyéb hegek). Apró lyukakat üt az epidermiszben és megsérti a felületi kollagén rostokat, ezek hatására beindul az új kollagén termelése és a bazális sejtréteg kisimul.

AA Prestige DIAMOND SKIN

45 éves kortól

*Intenzív anti-ageing hatású program: nappali, éjszakai krémek, hatást növelő szérum.
 Stimuláló, regeneráló, intenzív lifting hatású.*

A készítmények erősítik, feszesítik a bőrt, gyémántszerű ragyogást biztosítanak az arcnak. Belső lifting hatású tetrapeptidok és a GP4G molekula biztosítják a hatékony ránctalanító hatást, a bőr puhává, gyémántszerűen ragyogóvá válik. A sejtmegújító, regeneráló hatású rizsproteinek stimulálják a kollagén szintézisét. A napfény hatására aktiválódó, C- és E-vitamin tartalmú Smartvector UV védelmet nyújt a napsugarak káros hatásaival szemben és a bőrfoltok kialakulása ellen. A kék lótszvirág kivonat és a szója fehérjék hosszantartó hidratálást biztosítanak. A kolloid arany tartósan selymessé és ragyogóvá varázsolja a bőrt.



VYTALON gél

Allergiamentes, tiszta HYALURONSAV tartalmú gél

A hyaluronsav méltán vált az egyik legnépszerűbb anyaggá a kozmetikában eredményes és sokrétű felhasználhatósága miatt.

Rendszeres használattal biztosítja a bőr hidratáltságát, megakadályozza kiszáradását, meggátolja a ráncosodást még bőrszárazságot okozó körülmények között is.

Segítségével javul a bőr vízmegkötő képessége, nő a bőr rugalmassága, gyorsul a sebgyógyulás. A bőrt simává, bársonyossá teszi.



Otthoni mindennapos használatra is ajánlható. Profesionális használata történhet ultrahanggal, iontoforézissel, softlézerrel, arcpakolások alá feltéve.

Más hatóanyagokkal is kombinálható.
 Kiszerezés: 50 ml

▼ Dr. Szendrő Eszter

Korunk egyik legtöbb vitát kiváltó esztétikai témaköre a sebészi beavatkozás nélküli zsírlebontás. Sokak számára jelent mindennapos, hosszú évek óta tartó küzdelmet a makacs zsírpárnák, vagy a cellulit elleni harc. Rendszeresen sportoló, táplálkozásukra odafigyelő emberek körében is találkozhatunk olyanokkal, akik nem tudnak megbirkózni egy-egy makacs, eredendően több zsírszövettel megáldott testrészükkel. Számukra évtizedekig – az egyéb okokból túlsúlyos sorstársaikhoz hasonlóan – a hosszú lábadozással és fájdalommal járó, sebészi beavatkozással történő zsírleszívás jelentette az egyetlen lehetőséget.




Bipolaris technika működési elve



Unipolaris technika működési elve



Kezelés előtt, közben és után

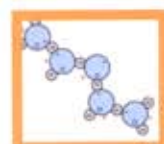

Víz molekula polarizációja



Napjainkban a felesleges zsír eltávolítására, bontására és a cellulit kezelésére újabb és újabb technikák jelennek meg. Olyan forradalmi eljárások, melyek fájdalommentesek, nem igényelnek lábadozási időt, és semmilyen tevékenységükben nem korlátozzák a pácienseket. Az izraeli gyártók különösen élen járnak ezeken a területeken.

A rádiófrekvenciás eljárások során a zsírok és a cellulit eltávolítása három mechanizmus révén valósul meg:

- Mélységi bőrmelegítés és bőrfeszítés kollagéneképzés/feszítés szabályozással.
- A vér mikrokeringésének javítása.
- A megrekedt zsír- és toxinmaradékok limfatikus elvezetése.

A jelenlegi piacon a legtöbb gyártó 0,1-1 MHz közötti rádiófrekvenciát alkalmaz a terápiás eljárások során.

A gyorsabb és hatékonyabb kezelések érdekében azonban már 40,68 MHz-en működő berendezéseket is találunk. Jelenleg ezek a legkorszerűbb rádiófrekvenciás, kozmetikai és esztétikai célra kifejlesztett eszközök.

Kutatások szerint az említett frekvenciaérték a legnagyobb, ami egészségkárosítás nélkül bevihető egy emberi szervezetbe.

A berendezések a következő elven működnek:

Az emberi szövetek fő alkotóeleméül szolgáló vízmolekulák polarizáltak – a hidrogén atomok felől pozitív, az oxigén atom felől negatív töltéssel. A rádiófrekvencia hatására a vízmolekulák egy állandó, igen gyors pozícióváltásba kezdenek. A 40,68 MHz azt jelenti, hogy a vízmolekulák egy másodperc alatt 40 milliószor változtatják pozíciójukat. Ez a súrlódási energia révén hőhatást generál, amely felmelegíti a környező szöveteket, így a magas hőmégtartó képességű zsírszövetet is. A kezelése során a cél a terápiás terület 40-42 °C-ra való felmelegítése és tartása, majd meghatározott energia mennyiség közlése a problémás területre.

Az In-motion technológiával a fájdalom a múlté.

Az In-motion technológia hűtött rádiófrekvenciás fejjel áttörést jelent az ügyfelek komfortérzete, a kezelés gyorsasága és hatékonysága terén. Az eljárás lényege, hogy a kezeléseket a kezelőfej folyamatos, körkörös mozgásával végzik, így lehetővé teszik az energia egyenletes elosztását. A kezelése során fokozatosan érik el a célzott terápiás hőmérsékletet, biztosítva a felsőbb bőrrétegek védelmét, a sérülések és a fájdalom kockázatának minimalizálásával.

Spa RF



Rádiófrekvenciás zsírbontó, cellulitisz kezelő és bőrfeszítő készülékek

- unipoláris és bipoláris technika
- hűtött, könnyű kezelőfejek
- 40,68 MHz-es frekvencia
- minden egyes kezelés után látható eredmény
- In Motion technika a fájdalommentes kezeléshez
- Pixel RF kezelőfej a hegek és stria eltüntetéséhez

ACCENT^{XL}



Kezelés előtt



Kezelés után



Kezelés előtt



Kezelés után

SOPRANO^{XL}

Lézerdiódás szőrtelenítő készülék

- akár 10 Hz pulzus ismétlődési frekvencia
- 810 nm hullámhossz
- akár 120 J/cm² teljesítménysűrűség
- HR és SHR üzemmódok
- fájdalommentes az SHR „In Motion” technikának köszönhetően
- hűtött kezelőfej
- alkalmazható minden bőr- és szőrtípushoz
- nem igényel különleges, drága fogyóeszközöket
- korlátlan impulzusszám



Kezelés előtt



Kezelés után

Forgalmazza:

Sonarmed Kft.

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.

+36 (1) 203 75 81 ; www.almalasers.hu; www.sonarmed.hu

